

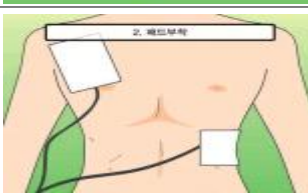






자동제세동기 사용법

 <p>1. 자동제세동기 도착</p>	<p>1. 자동제세동기 도착</p> <ul style="list-style-type: none"> • 심폐소생술 시행 중에 자동제세동기가 도착하면 지체 없이 적용합니다.
 <p>2. 전원켜기</p>	<p>2. 전원켜기</p> <ul style="list-style-type: none"> • 자동제세동기를 심폐소생술에 방해가 되지 않는 위치에 놓은 뒤 전원버튼을 누르세요.
 <p>3. 패드 부착</p>	<p>3. 두개의 패드 부착</p> <ul style="list-style-type: none"> - 패드 1 : 오른쪽 빗장뼈 바로 아래 - 패드 2 : 왼쪽 젖꼭지 옆 겨드랑이 • 패드와 제세동기 본체가 분리되어 있는 경우에는 연결하세요
 <p>3. 심장리듬 분석</p>	<p>4. 심장리듬 분석</p> <ul style="list-style-type: none"> • “분석 중...” 이라는 음성 지시가 나오면, 심폐소생술을 멈추고 환자에게 손을 떼세요. • 제세동이 필요한 경우 “제세동이 필요합니다” 라는 음성지시와 함께 자동제세동기 스스로 설정된 에너지로 충전을 시작합니다. • 제세동이 필요없는 경우 “제세동이 필요하지 않습니다” 라는 음성지시가 나오며 즉시 심폐소생술을 다시 시작하여야 합니다.
 <p>5. 제세동 실시</p>	<p>5. 제세동 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> • 제세동이 필요한 경우에만 제세동 버튼이 깜박이기 시작하며, 깜박일 때 제세동 버튼을 눌러 제세동을 시행하세요. * 제세동 버튼을 누르기 전에는 반드시 다른 사람이 환자에게서 떨어져 있는지 다시 한번 확인하도록 합니다.
 <p>6. 즉시 심폐소생술 다시 시행</p>	<p>6. 즉시 심폐소생술 다시 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> • 제세동을 실시한 뒤 즉시 가슴압박과 인공호흡 비율을 30:2로 심폐소생술을 다시 시작하세요.
 <p>7. 119 구급대가 현장에 도착할 때까지 지속</p>	<p>7. 2분마다 심장리듬 분석 후 반복 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> • 회복되었거나 119구급대가 도착할 때까지 2분마다 심장리듬 분석 및 반복 시행토록 하세요.